

# Ficha técnica

**HY8622**

**CE 0086**

**Designação:**

CAIXA DE 10 MEIAS-MÁSCARAS DESCARTÁVEIS MOLDADAS FFP2 COM VÁLVULA

**Cores:**

Branco

**Materiais:**

Máscaras: fibra sintética não tecida.

Cintas: elástico.



**Descritivo:**

Peça facial FFP2 com válvula filtrante composto de um componente filtrante, de um conjunto de cintas em elastómero não alérgeno, de um clipe nasal ajustável, de um reforço de espuma na borda, de um clipe nasal interno e de uma válvula de expiração. Caixa distribuidora de 10.

**Instruções de uso:**

Esta máscara é classificada de acordo com a sua eficácia de filtração e a sua capacidade máxima de vedação. FFP2 : Máscara de protecção contra partículas sólidas e líquidas de toxicidade média. Pode ser utilizada para concentrações que podem ir até 10 X o Valor Médio de Exposição (VME).

Poder de filtração do filtro: 94% - Factor de protecção nominal (NPF) : 12.5

Não utilizar durante mais de 8 horas seguidas e eliminá-la após a utilização. Retirar a máscara da respectiva embalagem imediatamente antes da sua utilização. Utilizar apenas se a concentração de contaminantes não colocar qualquer perigo imediato à vida ou à saúde, e unicamente em conformidade com as normas aplicáveis em matéria de saúde e segurança. Antes de utilizar qualquer máscara, verificar a sua integridade e o respectivo prazo de validade (indicado na embalagem), confirmando se a sua classe de protecção (FFP2) é a mais adequada para a aplicação pretendida (produto utilizado e concentração).

**Limitações de uso:**

O utilizador deverá receber a formação necessária para utilização da máscara, tomando conhecimento das respectivas instruções antes de a utilizar. Utilizar a máscara em locais bem arejados, onde não se verifique falta de oxigénio (> 20%) e que não contenham atmosferas explosivas. A máscara deve ser correctamente posicionada para assegurar o nível de protecção esperado. Não deve ser utilizada por pessoas com pilosidades no rosto (barba, suíças) que possam impedir a estanqueidade da máscara, ou se for detectada qualquer fuga.

Sair imediatamente do local se a respiração se tornar difícil e/ou se sentir tonturas ou mal-estar. Não introduzir qualquer modificação nesa máscara, rejeitá-la caso se apresente danificada. O incumprimento destas instruções de utilização pode afectar a saúde do utilizador e dar origem a problemas graves, susceptíveis até de provocar risco de morte. Esta máscara não deve ser utilizada em mais do que um posto de trabalho. Não utilizar fora do domínio de utilização definido nas instruções acima indicadas. O contacto com a pele pode causar reacções alérgicas a pessoas sensíveis. Neste caso, abandonar a zona de risco, retirar a máscara e consultar um médico.

**Instruções de armazenamento:**

Guardar em local fresco e seco, ao abrigo da geada e da luz, na embalagem de origem.

**Instruções de limpeza/ manutenção:**

Esta máscara só deve ser utilizada uma única vez (não tem manutenção)

**Desempenho:**

Conforme às exigências da directiva europeia 86, nomeadamente em termos de ergonomia, de inocuidade, de conforto, de arejamento e de maleabilidade e á norma EN149:2001+A1:2009 ISO 9001:2000 (factor de protecção nominal: 10xVME Valor Médio Exposição) para partículas de toxidade fraca a média).

**AIR  
SAFE**